



Användningsområden

Med testmedlet Ecocontrast genomför man en normal handdesinfektion. Händerna belyses sedan i HandCheck® vision boxen, där ett bra resultat är vitt medan oberörda ställen är mörka.

HandCheck® vision används för hygienutbildning inom sjukvården, livsmedelsindustrin och den farmakologiska industrin. Den används för att på ett enkelt och tydligt sätt se hur en handdesinfektion har genomförts. Ett utmärkt hjälpmedel för ambulering undersökningar, såväl som i utbildningssyfte av ny personal.

Produktegenskaper

Ecocontrast är ett testmedel som används i undervisningssyfte för på ett enkelt och tydligt sätt se hur en handdesinfektion har genomförts. Den levereras med pump och är en färdig brukslösning.

Benämning	Ecocontrast
Produktgrupp	Testmedel
Utseende	Ofärgad
Densitet (20 °C)	0,9 g/cm ³
pH	ca 7

Användning

1. Dosera Ecocontrast på torra händer och gör en hygienisk handdesinfektion
2. Gnid in tills händerna är torra
3. Sträck in händerna under UV lampan
4. Hudytor som är täckta med Ecocontrast lyser vita och missade hudytor framstår som mörkare.

Täck känsliga ytor innan testet påbörjas för att undvika fläckar. Torka omedelbart upp spill. Tvätta händerna grundligt efter testet.

Notera: Ecocontrast får endast användas i undervisningssyfte. Skall ej användas i dagligt bruk för hygienisk eller kirurgisk handdesinfektion.

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
32232	600 ml flaska	12

Transport och förvaring

Tål temperaturer ner till -2 °C. Har det frusit går det bra att tina men skaka om förpackningen efteråt.

Säkerhetsföreskrifter

Produkten är brandfarlig, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

<https://webshop.rekal.se/sv/sakerhetsdatablad>

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.